



Stérilisation – Nettoyage / désinfection manuel des dispositifs médicaux

P

Procédure

1. OBJET

Le lavage manuel est réservé aux dispositifs médicaux (DM) ne pouvant être traités en laveur désinfecteur (selon les indications du fabricant)

2. DOMAINE D'APPLICATION

Service de stérilisation

3. DEFINITION

Le lavage manuel des DM permet d'éliminer les salissures par l'action physico chimique d'un produit adapté conjuguée à une action mécanique. Le nettoyage des dispositifs médicaux est une des étapes essentielles permettant de garantir le succès de l'opération de stérilisation.

4. RESPONSABILITES

L'ensemble du personnel travaillant dans le service de stérilisation.

5. DEROULEMENT

Le lavage manuel des dispositifs fait suite à l'opération de pré désinfection.

Le lavage manuel des DM doit être précédé d'un rinçage du DM

Matériel : éponge, brosses, écouvillons adéquats

Produit : détergent désinfectant

Méthode :

- ▶ vérifier que le DM est complètement démonté, déclampé, ouvert
- ▶ frotter minutieusement avec le matériel adéquat toutes les parties du DM
- ▶ rincer à l'eau du réseau
- ▶ rincer à l'eau déminéralisée

Le lavage manuel doit être suivi d'un séchage minutieux à l'aide de :

- air médical comprimé
- linge propre, non pelucheux

Une fois séché, le DM sera acheminé en zone de conditionnement

NB. Le lavage manuel peut être complété, selon les indications du fabricant, (creux, charnières, etc...) par l'utilisation de l'appareil à ultrasons et/ou machine à vapeur « STEAMER »

6. DOCUMENT ASSOCIE

Fiche technique : Changement de la solution désinfectante détergente

Fiche technique : Liste des DM devant être lavés manuellement

7. DOCUMENTS ET TEXTES DE REFERENCE

- CMIE-PRO-58-001 Table de dilution pour les solutions désinfectantes
- CMIE-PRO-58-002 Décontamination (Pré-désinfection avant stérilisation et désinfection de niveau intermédiaire - Deconex 53 Plus)
- CMIE-PRO-58-003 Décontamination (Pré-désinfection avant stérilisation et désinfection de niveau intermédiaire - Sekusept Plus)

8. VALIDATION

N° de version	Date d'émission	Classement	Elaboration/Modification	Vérification Approbation Visa (s)
1	22.02.2008		GT –stérilisation VD	

9. DISTRIBUTION

L'ensemble du personnel concerné.