



Stérilisation Nettoyage des dispositifs médicaux en laveur désinfecteur

P

Procédure

1. OBJET

Le nettoyage physico-chimique est réservé aux dispositifs médicaux (DM) pouvant être traités en laveur désinfecteur (selon les indications du fabricant)

2. DOMAINE D'APPLICATION

Service de stérilisation

3. DEFINITION

Le nettoyage des DM est une des étapes essentielles permettant de garantir le succès de l'opération de stérilisation.

Le nettoyage en laveur désinfecteur des DM permet d'éliminer les salissures par l'action physico chimique d'un produit tel un détergent conjugué au pouvoir physique germicide réalisé par l'action de la chaleur humide à températures supérieures à 65°C.

4. RESPONSABILITES

L'ensemble du personnel du service de stérilisation.

5. DEROULEMENT

Le lavage en laveur désinfecteur des dispositifs est fait soit directement après l'utilisation, soit suite à l'opération de pré désinfection.

Méthode :

- ▶ vérifier que tous les DM sont complètement démontés et/ou ouverts
- ▶ répartir les DM sur le support de charge adapté (élément qui entre dans le LD tel support pour instruments chirurgicaux, conteneurs, sabots, matériel d'anesthésie, matériel d'endoscopie, etc), selon la charge de référence définie lors de la validation du laveur désinfecteur
- ▶ remplir le formulaire FT0231 : Liste de chargement des DM dans le laveur désinfecteur
- ▶ sélectionner le programme adapté, suivant le type de charge
- ▶ enclencher l'appareil
- ▶ contrôler la conformité du déroulement du cycle
- ▶ sortir le matériel
- ▶ contrôler le séchage et le compléter si nécessaire à l'aide de :
 - air médical comprimé
 - linge propre, non pelucheux

Une fois séché, le DM sera acheminé en zone de conditionnement

6. DOCUMENT ASSOCIE

Fiche technique 0221 : liste de chargement des DM dans le laveur désinfecteur

7. DOCUMENTS ET TEXTES DE REFERENCE

- PT 22008 Nettoyage des DM dans le laveur désinfecteur ad hoc - Réseau Santé Valais
- FO 22009 Liste de chargement des DM dans le laveur désinfecteur ou l'autoclave- Réseau Santé Valais
- Bonnes pratiques de retraitement des dispositifs médicaux – Swissmedic 2005

8. VALIDATION

N° de version	Date d'émission	Classement	Elaboration/Modification	Vérification Approbation Visa (s)
1	12.08.2008		GT - stérilisation VD	

9. DISTRIBUTION

L'ensemble du personnel concerné.