



Valimed SA

Ch. des Anciens-Moulins 2a
CH-1009 Pully

T. +41 21 721 74 74
F. +41 21 721 74 70

info@valimed.ch
www.valimed.ch

Présentation de la société:

- Société anonyme
- Inscrite au RC depuis le 1^{er} juillet 2010
- Siège à Pully, canton de Vaud
- Certifié ISO 9001: 2008 et 13485: 2003, depuis décembre 2010



Présentation de l'équipe:

Stéphane MAYOR

- Membre fondateur et associé
- Président du conseil d'administration
- D. U. stérilisation hospitalière (Fr)

Mais aussi:

- Chef d'entreprise de la société

**MayBach**<sup>AG
SA</sup>

- Secrétaire de la SSSH



Grégoire JAQUET

- Membre fondateur et associé
- Secrétaire du conseil d'administration
- CEO de la société
- Spécialiste en validation
- Formation STE niv.1
- En cours de formation STE niv.2 et 3



Jean – Marc BERSET

- Membre fondateur et associé
- Membre du conseil d'administration
- Actif dans la société depuis 1^{er} avril 2011
- Spécialiste en hygiène hospitalière
- Spécialiste en validation
- En cours de formation STE niv.3



Nos activités:

- Contrôle, expertise et conseils dans le domaine médical
- Optimisation des stérilisateurs
 - Analyse et optimisation des cycles
- Optimisation des laveurs-désinfecteurs
 - Analyse et vérification des programmes, des températures, de l'eau, des dosages et des résultats à la sortie du LD

Nos activités:

- Validations selon les normes
EN ISO 17665-1:2006 & -2:2009
des dispositifs médicaux liés au
retraitement tels que:

- Les stérilisateurs répondant à la norme:
EN 285:2006 + A1:2008 + A2:2009



Valimed SA

Ch. des Anciens-Moulins 2a
CH-1009 Pully

T. +41 21 721 74 74
F. +41 21 721 74 70

info@valimed.ch
www.valimed.ch

- Les petits stérilisateurs de classe B répondant à la norme:
EN ISO 13060:2004



Valimed SA

Ch. des Anciens-Moulins 2a
CH-1009 Pully

T. +41 21 721 74 74
F. +41 21 721 74 70

info@valimed.ch
www.valimed.ch

- Les laveurs désinfecteurs répondant à la norme: EN ISO 15883-1 à 7



Valimed SA

Ch. des Anciens-Moulins 2a
CH-1009 Pully

T. +41 21 721 74 74
F. +41 21 721 74 70

info@valimed.ch
www.valimed.ch

- Les soudeuses répondant à la norme:
EN ISO 11607-1 &2



Valimed SA

Ch. des Anciens-Moulins 2a
CH-1009 Pully

T. +41 21 721 74 74
F. +41 21 721 74 70

info@valimed.ch
www.valimed.ch

- Les bacs à ultrason selon les recommandations du guide HTM 2030



Valimed SA

Ch. des Anciens-Moulins 2a
CH-1009 Pully

T. +41 21 721 74 74
F. +41 21 721 74 70

info@valimed.ch
www.valimed.ch

Notre outillage:

- Nous avons choisi de travailler avec les sondes de mesure TMI Orion du type PTTc 1000 pression et température



Validation

- LPT_h – 2000
- ODim révision 2010
- OMCJ – 2003

La législation suisse dans le secteur des DM donne à l'utilisateur une responsabilité élevée, en fixant des objectifs et des références.

De ce fait, chaque appareil de retraitement des DM doit être validé, à l'installation, chaque année et après toute réparation importante.

Valimed SA

Ch. des Anciens-Moulins 2a
CH-1009 Pully

T. +41 21 721 74 74
F. +41 21 721 74 70

info@valimed.ch
www.valimed.ch

Pour les petites structures:

- Problème de coûts!
- En effet, les déplacements et le temps d'attente devant les appareils par les techniciens engendrent des frais importants.
- Solution:
«Passer de faire-faire, à faire soi-même»

SVS (Self Validation System)

- Ce nouveau concept ne s'adresse qu'aux utilisateurs de petits stérilisateurs de classe B. (EN ISO 13060)



Valimed SA

Ch. des Anciens-Moulins 2a
CH-1009 Pully

T. +41 21 721 74 74
F. +41 21 721 74 70

info@valimed.ch
www.valimed.ch

SVS, le concept:

- Notre concept a pour but de diminuer les frais au maximum afin de devenir acceptables pour les petites structures. Le praticien qui utilise un stérilisateur peut effectuer lui-même la partie pratique d'une validation en suivant un cahier des charges précis. Par conséquent, le technicien n'est pas nécessaire, seul le matériel (les sondes) est indispensable pour réaliser la partie pratique d'une validation.

SVS, en détails:

- En lieu et place du technicien, vous recevez par poste une valise et c'est vous-même qui procédez à votre validation, selon un protocole établi très précis:



Valimed SA

Ch. des Anciens-Moulins 2a
CH-1009 Pully

T. +41 21 721 74 74
F. +41 21 721 74 70

info@valimed.ch
www.valimed.ch

SVS, en détails:

- Contenu de la valise:
 - 3 sondes pression – température
 - 1 appareil photo (avec 2 piles de réserve)
 - 1 test TST Helix (Bowie & Dick)
 - 10 indicateurs chimiques de Cl. 6
 - 1 marker fin
 - 1 DVD manuel d'instruction (www.valimed.ch)
 - 1 étiquette autocollante pour le renvoi
 - 1 protocole de validation



SVS, par étape:

Protocole très précis qui décrit et définit le déroulement de chaque étape:

- Réception de la valise
- Essai de fuite d'air
- Test Bowie & Dick
- Cycle prion 3x (QP) ou 1x (RQ)
- Fin des mesures et renvoi de la valise



SVS, pour qui?

- Cabinets dentaires
- Cabinets médicaux
- Podologues et pédicures
- Vétérinaires
- Tatoueurs
- Tous les utilisateurs de petits stérilisateurs de classe B. (EN ISO 13060)

SVS, les prix:

- Qualification opérationnelle +
qualification des performances:
CHF HT 850.-
- Qualification opérationnelle +
requalification des performances:
CHF HT 750.-

www.valimed.ch

- SVS étape par étape en vidéo
- Liens utiles
- Documentation
- Prochainement:
réservation SVS en ligne

Remerciements:

- Comité de la SSSH
- De votre attention

Toute l'équipe se réjouit de vous accompagner lors de vos validations....



Valimed SA

Ch. des Anciens-Moulins 2a
CH-1009 Pully

T. +41 21 721 74 74
F. +41 21 721 74 70

info@valimed.ch
www.valimed.ch